

# Comment prélever l'échantillon - Biron PGx


Biron **B**


## Instructions




**Avant de prélever un échantillon de salive, vous devez activer la trousse.**

**Avant de prélever un échantillon de salive, vous devez activer la trousse.**


1.  S'assurer que le patient **n'a pas bu, mangé, fumé ou mâché** de la gomme **30 minutes** avant le prélèvement. Le tube ne doit contenir que de la **salive claire**.


2.  Demander au patient de cracher dans l'entonnoir du tube jusqu'à ce que la salive atteigne la ligne supérieure ou la dépasse légèrement. Il faut recueillir 1 mL de salive claire qui peut être prélevée en plusieurs crachats.

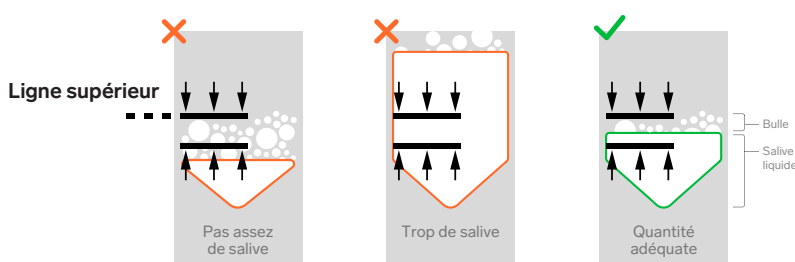


**Pour de l'assistance administrative,** contactez l'équipe de Biron Génétique à [pgxinfo@biron.com](mailto:pgxinfo@biron.com) ou au 1-866-923-9222 #8723.

**Une notification sera envoyée par courriel et télécopieur** lorsque vous pourrez récupérer le rapport sur le portail. Il faut compter environ 5 jours ouvrables, après la réception de l'échantillon, pour obtenir les résultats.

3.  Refermer le couvercle de l'entonnoir. Le liquide stabilisateur bleu qu'il contient se mélangera à la salive. Le mélange ne devrait pas dépasser les 3/4 du tube.

4.  Dévisser l'entonnoir et visser fermement le petit bouchon fourni. Mélanger le tube pendant environ 5 secondes. L'entonnoir peut être jeté.

5.  Inscrire le nom du patient sur l'étiquette fournie (sur la fiche d'activation dans la trousse) et le coller sur le tube sans cacher son numéro.

7.  Placer dans l'enveloppe préaffranchie : **Le tube de salive + La requête signée par le médecin**  
Sceller et poster l'enveloppe dans une boîte à lettres ou au bureau de poste