



Comment prélever votre échantillon de salive?

How to collect your saliva sample?

Biron **B**

- 1** Ne pas boire ni manger **30 minutes avant** l'échantillonnage.
Do not eat or drink for **30 minutes before** providing samples.

- 2** Cracher dans l'entonnoir jusqu'à la **ligne supérieure** ou très légèrement au-dessus.
Spit into funnel up to **top line** or slightly above.

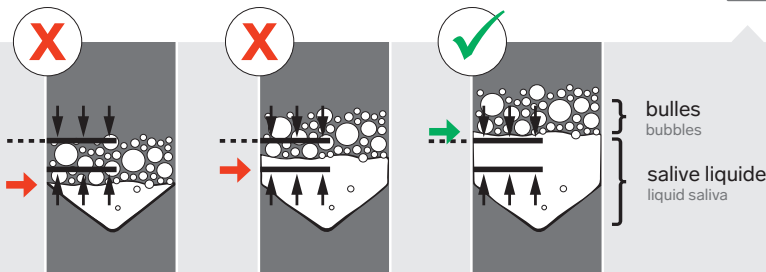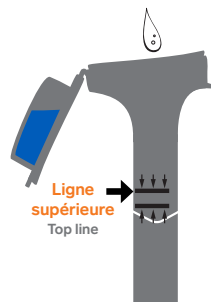

Pas assez
Not enough

Pas assez
Not enough

Quantité adéquate
Correct amount



3

Refermer le couvercle de l'entonnoir pour libérer le liquide stabilisateur bleu.

Snap funnel lid shut to release blue stabilization liquid.



4

Jeter l'entonnoir et visser fermement le petit bouchon fourni.


Discard funnel and screw small cap (supplied) on tightly.



5

Coller le code barres sur le tube et insérer le tube dans le sac de plastique prévu à cet effet.

Stick the barcode on the tube and insert the tube into the plastic bag provided.

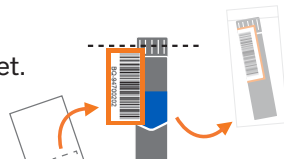

6

Mettre le sac de plastique contenant le tube (et la prescription du test, si applicable) dans l'enveloppe puis retourner par la poste.

Place the plastic bag containing the tube (and test prescription, if applicable) in the envelope and return by mail.



Instructions vidéo  Video instructions

biron.com/instructions