

Philips Respironics Dreamstation 2



! Il est fortement suggéré de nettoyer le masque avant le premier usage.

Chaque jour



Changez l'eau de votre **chambre humidificatrice**. Utilisez seulement de l'eau distillée ou déminéralisée.¹



Lavez le **coussin de votre masque** à l'eau tiède savonneuse ou à l'aide d'une lingette destinée à cet usage.

Chaque semaine



Lavez à l'eau tiède savonneuse le masque, la chambre humidificatrice et tubulure respiratoire



Nettoyez le **filtre hypoallergène** sous l'eau (sans savon).

Tous les mois



Changez le **filtre**.
Filtre ultrafin: Tous les mois

Tous les 6 mois



Si vous ne changez pas vos **masque 2 fois par année**, remplacer votre **coussin tous les 6 mois**.



Changer la **tubulure et le filtre**.
Filtre hypoallergène: Tous les 6 mois

Chaque année



Changer la **chambre humidificatrice** à tous les ans.



Remplacez le **masque** à tous les ans, mais idéalement à tous les 6 mois.



Changez toute pièce d'équipement fissurée, terne ou abîmée.

Même dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, il est impossible de prévenir la formation de certains micro-organismes. C'est pourquoi il est recommandé de remplacer les accessoires de façon régulière pour assurer l'efficacité du traitement.

1. Disponible dans toutes les pharmacies et également dans certaines épiceries et magasins grandes surfaces.