


Fisher & Paykel Sleepstyle



 Il est fortement suggéré de nettoyer le masque avant le premier usage.

Chaque jour



Changez l'eau de votre chambre humidificatrice.

Utilisez seulement de l'eau distillée ou déminéralisée¹.




Lavez le coussin de votre masque à l'eau tiède savonneuse ou à l'aide d'une lingette destinée à cet usage.

Chaque semaine



Lavez à l'eau tiède savonneuse.

le masque, la chambre humidificatrice et son joint, la tubulure et le joint d'étanchéité.

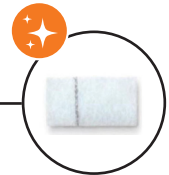

Inspectez le filtre.

Vérifiez que le filtre ne soit pas obstrué par de la saleté. Changez votre filtre dès qu'il est souillé.

Tous les 3 mois



Changez le filtre. Lorsque vous remplacez votre filtre, la ligne noire doit être placée vers l'intérieur de l'appareil.

En fonction de l'environnement où se trouve l'appareil, votre filtre peut nécessiter un changement plus fréquent.

Chaque année



Changez la tubulure respiratoire à tous les ans et la chambre humidificatrice.



Remplacez le masque à tous les ans, mais idéalement à tous les 6 mois.



Changez toute pièce d'équipement fissurée, terne ou abîmée.

Même dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales, il est impossible de prévenir la formation de certains micro-organismes. C'est pourquoi il est recommandé de remplacer les accessoires de façon régulière pour assurer l'efficacité du traitement.

1. Disponible dans toutes les pharmacies et également dans certaines épiceries et magasins grandes surfaces.