



**ResMed**

**AirFit™ X30i**

## Guide d'ajustement pour AirFit X30i



- En tenant le bas du coussin d'une main et le cadre de l'autre, positionnez le masque devant votre visage.



- Placez le coussin sous votre nez et assurez-vous qu'il repose bien contre votre visage. Avec le logo ResMed sur le harnais orienté vers le haut, passez le harnais et le cadre par-dessus votre tête.



- Passez les sangles inférieures du harnais sous vos oreilles, puis fixez les clips magnétiques aux connecteurs du cadre.



- Défaites les pattes de fixation des sangles supérieures du harnais, puis tirez uniformément.



- Répétez l'étape 4 avec les sangles inférieures du harnais.



- Connectez le tuyau d'air de l'appareil au coude du masque.

## Options supplémentaires

Pour les personnes aux cheveux longs, nous recommandons de faire passer leurs cheveux par l'arrière du harnais. Si les cheveux sont attachés en queue de cheval, la hauteur doit permettre de les faire passer par l'arrière du harnais.

Consultez le guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions supplémentaires ainsi que des informations complètes sur l'étiquetage, incluant les indications, contre-indications, avertissements et précautions.

\* Le remboursement de l'AirFit X30i diffère de celui d'un masque facial intégral. Medicare autorise un (1) remplacement de coussin par mois pour un masque facial intégral. Étant donné que l'AirFit X30i est un masque bucco-nasal, chaque coussin nasal et coussin buccal peut être remplacé jusqu'à deux (2) fois par mois. Voir ci-dessous la liste des codes HCPCS pour les masques bucco-nasaux. Pour plus d'informations, consultez la politique de détermination de couverture locale de Medicare, que vous pouvez trouver en ligne à l'adresse suivante : <https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/>

\*\* Le masque contient des aimants qui peuvent interférer avec certains implants ou dispositifs médicaux. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur pour obtenir tous les renseignements d'étiquetage, y compris les contre-indications et les avertissements liés aux aimants. Codes HCPCS pour les masques bucco-nasaux :

A7027 Masque combiné bucco-nasal

A7028 Coussin buccal de remplacement pour masque combiné bucco-nasal

A7029 Coussin nasal de remplacement pour masque combiné bucco-nasal

A7035 : Harnais

Remarque : Les lignes directrices des autres payeurs peuvent varier. Il est de votre responsabilité de vérifier toutes les exigences relatives au remboursement.

Les informations fournies le sont « telles quelles », sans aucune garantie expresse ou implicite et sont fournies uniquement à titre informatif pour un usage interne. Ces informations ne constituent ni un avis professionnel ni un avis juridique en matière de remboursement et doivent être utilisées sous votre seule responsabilité et à votre discrétion. Tous les codes, politiques de couverture et informations sur le remboursement sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. ResMed ne déclare ni ne garantit l'exactitude ou la véracité des informations fournies, et vous acceptez de dégager ResMed de toute responsabilité en cas de perte, de dommage, d'obligation ou de réclamation résultant de l'utilisation des informations de remboursement mises à votre disposition. Avant de soumettre une demande de remboursement, il incombe exclusivement au fournisseur de vérifier les exigences et politiques en vigueur auprès du payeur.

Distribué par ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 USA +1-858-836-5000 ou 1-800-424-0737 (numéro sans frais). Visitez notre site Internet ResMed.com pour obtenir plus de renseignements sur nos bureaux dans le monde. AirFit et QuietAir sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de la famille d'entreprises ResMed. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir des informations sur les brevets et autres propriétés intellectuelles, visitez le site ResMed.com/ip. © ResMed, 2025. 10112730/1 2025-04



## Offrez aux patients un masque conçu pour allier liberté et stabilité

Conception bucco-nasal avec orientation du tube vers le haut

Voici le masque bucco-nasal AirFit™ X30i de ResMed, conçu avec un tube orienté vers le haut pour offrir aux patients la couverture d'un masque facial intégral, avec la stabilité supplémentaire d'un coussin nasal à embouts.

L'AirFit™ X30i est une option idéale pour les patients qui respirent par la bouche et souhaitent une liberté de mouvement, tout en bénéficiant de la stabilité et de l'étanchéité d'un masque bucco-nasal.





## Optimisez votre potentiel de réapprovisionnement

Étant donné que l'AirFit™ X30i est un masque bucco-nasal, les coussins buccaux et nasaux à embouts peuvent être remplacés jusqu'à deux fois par mois.\*

### Points forts de l'AirFit X30i

#### Conception du masque

##### avec tube orienté vers le haut

Déplace le tube à air hors du chemin pour offrir aux patients la liberté de dormir dans n'importe quelle position.

#### Cadre SpringFit

Avec un conduit flexible permettant à l'air sous pression de circuler à travers le coude et d'atteindre le cadre et le coussin.

#### Système modulaire de harnais et de cadre


Est compatible avec le masque AirFit™ F30i, permettant aux nouveaux et anciens patients de déterminer celui qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour les patients qui ont des difficultés avec l'étanchéité ou dont le masque est trop bruyant, l'AirFit X30i peut être une meilleure option.

#### Clips magnétiques\*\*

S'attachent et se détachent facilement pour un ajustement et un retrait aisés.

#### Masque bucco-nasal

Associe la couverture d'un coussin facial complet à l'étanchéité et à la stabilité d'un coussin nasal à embouts, grâce à des coussins doubles pour plus de confort et de performance.

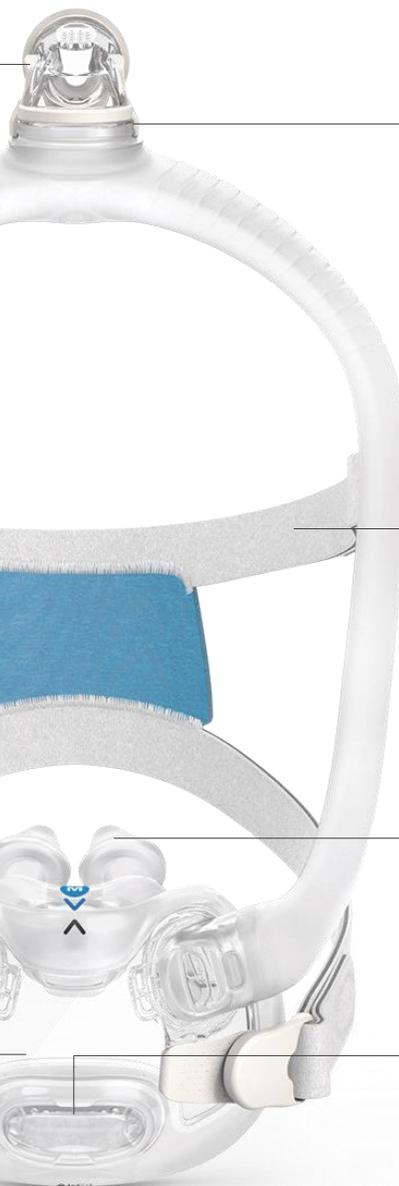

#### Coude à retrait rapide

Permet aux patients de déconnecter et de reconnecter facilement le masque au tube.

#### Harnais en tissu doux

Est spécialement conçu pour offrir douceur et stabilité grâce à plusieurs points de connexion au système de masque.

#### Coussin nasal à embout

Repose sur le bord des narines pour s'ajuster au contact. Le coussin nasal se connecte au coussin buccal et diffuse la pression thérapeutique en douceur vers le patient par le nez.

#### Ventilation diffusée QuietAir™

Il est conçu pour être plus silencieux qu'un murmure tout en minimisant les courants d'air pour les patients et leurs partenaires de lit.

**Système de masque complet**

64300  
64301  
64350

Coussin buccal (STD)  
64308

Coussin nasal à embouts (S, M, L)  
64309  
64310  
64311

Cadre (SML, STD, LGE)

Casque  
63372

Système de cadre (64302, 64303, 64304, 64305, 64306, 64307, 64351, 64352, 64353)

**AirFit™ X30i**

## Codes de produit AirFit X30i

Système de masque complet  
(inclut le cadre, le coussin buccal, le coussin nasal à embouts et le coude)

| Nom du produit       | Code du produit |
|----------------------|-----------------|
| AirFit X30i SML STPK | 64300           |
| AirFit X30i STD STPK | 64301           |
| AirFit X30i LGE STPK | 64350           |

Coussin nasal à embouts

| Nom du produit                          | Code du produit |
|---|-----------------|
| AirFit X30i COUSSIN NASAL À EMBOUTS - S | 64309           |
| AirFit X30i COUSSIN NASAL À EMBOUTS - M | 64310           |
| AirFit X30i COUSSIN NASAL À EMBOUTS - L | 64311           |

Coussin buccal

| Nom du produit                 | Code du produit |
|--------------------------------|-----------------|
| AirFit X30i COUSSIN BUCCAL STD | 64308           |

Casque

(inclut le harnais et les clips magnétiques)

| Nom du produit           | Code du produit |
|--------------------------|-----------------|
| HARNAIS AirFit F30i/X30i | 63372           |

Systèmes de cadres

| Nom du produit                       | Code du produit |
|--------------------------------------|-----------------|
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i SML - S | 64302           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i SML - M | 64303           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i SML - L | 64304           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i STD - S | 64305           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i STD - M | 64306           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i STD - L | 64307           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i LGE - S | 64351           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i LGE - M | 64352           |
| SYSTÈME DE CADRE AirFit X30i LGE - L | 64353           |